



Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji
powierzchni wyrobów medycznych

desam® OX

Zalety

- szerokie spektrum działania
- kompatybilny z zestawami suchych chusteczek schülke wipes
- bardzo dobre właściwości myjące,
- możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących,

Obszary zastosowania

Desam® OX może być stosowany do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na oddziałach intensywnej opieki, położniczych i pediatrycznych.

Właściwości produktu

Desam® OX jest przeznaczony do codziennego mycia oraz dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Działa bakteriobójczo, prątkobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa oraz sporobójczo (wobec *Clostridium difficile*).

Wskazówki dotyczące stosowania

Stosować w postaci roztworu wodnego uzyskanego przez rozcieńczenie odpowiedniej ilości koncentratu w wodzie bieżącej o temperaturze 20-25 st. C. Silnie zanieczyszczone przedmioty i powierzchnie najpierw oczyścić mechanicznie, a następnie zdezynfekować. W czasie dezynfekcji należy zwracać uwagę na całkowite zwilżenie dezynfekowanych powierzchni. Należy przestrzegać zalecanych czasów oddziaływania oraz steżeń roztworu roboczego. Nie należy stosować preparatu na powierzchnie ocynkowane, z miedzi, mosiądzu, aluminium oraz powierzchnie mechanicznie uszkodzonych.



Dane produktu

Substancje czynne: nadtlenuk wodoru 110 g/kg, chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy 28 g/kg, chlorek didecylodimetyloamoniowy 28 g/kg.

Wskazówki szczególne

Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych pomieszczeniach w zakresie temperatur od -10 do +25 st.C. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła; unikać bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
Termin ważności: 24 miesiące.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
Desam OX 5 kg KA	1/Karton	319016
Desam OX 1 l FL	1/Karton	70000070

Badania i informacje

Na życzenie dostarczamy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485 oraz ISO 9001.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax: + 48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Czechy
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz