



Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni

Desam Extra płyn

Zalety

- szerokie spektrum działania
- wysoka kompatybilność materiałowa
- bardzo dobre właściwości myjące
- możliwość dozowania przy pomocy automatów dozujących
- nie wymaga spłukiwania
- możliwość stosowania w obecności pacjentów

Obszary zastosowania

Produkt biobójczy przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni, ścian, podłóg w salach, korytarzach i pokojach w zakładach opieki zdrowotnej i profilaktyce ogólnej.

Właściwości produktu

Skoncentrowany preparat na bazie czwartorzędowych zasad amoniowych (QAV). Nie zawiera aldehydów. Preparat działa bakteriobójczo, grzybobójczo i prątkobójczo, inaktywuje wirusy rota i HBV/HIV.

Wskazówki dotyczące stosowania

Stosować w postaci roztworu wodnego uzyskanego przez rozcieńczenie odpowiedniej ilości koncentratu w wodzie bieżącej o temperaturze 20-25°C.

- bakterie, grzyby - 0,25% (2,5 ml) - 15 min.
- bakterie, grzyby - 0,5% (5 ml) - 10 min.
- rota-wirus - 1% (10 ml) - 5 min.
- wirus HBV/HIV - 1% (10 ml) - 5 min.
- dezynfekcja w środowisku z wystąpieniem prątków (Tbc) - 0,5% (5 ml) - 15 min.

Produkt wykazuje pełen efekt bójczy w stężeniu 1% w czasie 15 min. i temp. 20°C

Powierzchnie (ściany, podłogi, meble i sprzęt stanowiący wyposażenie sal, korytarzy, pokoi itp.) zmywać roztworem

intensywnie według stopnia zanieczyszczenia. Przedmioty te można zanurzyć lub wypełnić roztworem, pozostawić działaniu. Mycie i dezynfekcja zarówno dużych powierzchni, jak i pojedynczych sprzętów i urządzeń w pomieszczeniach nie wymaga wentylacji. Lekkie zabarwienie roztworu roboczego nie ma wpływu na deklarowaną skuteczność produktu. Roztwór roboczy przygotowywać w dobrze opłukanych naczyniach.



Desam Extra płyn

Dane produktu

Substancje czynne: chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC) zaw.: 5% (50g/kg), alkil (C12-C16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) zaw.: 3,5% (35g/kg), N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (diamina) zaw.: 6,6% (66g/kg)

Wskazówki szczególne

Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od środków spożywczych i wody pitnej. Zalecana temperatura magazynowania od -10°C do +30°C. Termin ważności 2 lata.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
Desam Extra płyn 1 l FL	1/Karton	70000066
Desam Extra płyn 5 kg KA	1/Karton	70000067

Badania i informacje

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 3939/09
Na życzenie dostarczymy niezbędne raporty dotyczące preparatu.



Firma Schulke CZ s.r.o. jest posiadaczem certyfikatów ISO 13485 oraz ISO 9001.

Podmiot odpowiedzialny
Schulke Polska Sp. z o. o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa, Polska
Telefon +48225682202
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Bochemie a.s., Lidicka 326, 73595
Bohumín, Czechy