


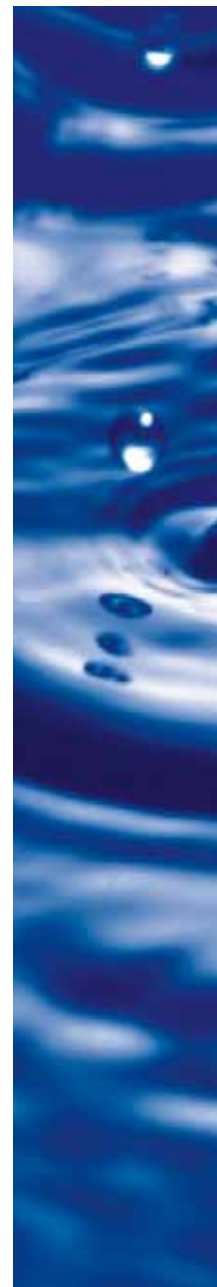

ANIOSPRAY QUICK

Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudno-dostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholu w placówkach służby zdrowia.



- preparat na bazie alkoholu
- szerokie spektrum biobójcze
- krótki czas działania
- aktywny wobec wirusów w 30 sekund
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
- przyjemny świeży zapach

Preparat gotowy do użycia



Wyrób medyczny kl. IIa, CE 0120



ANIOSPRAY QUICK

Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi w placówkach służby zdrowia.

PODSTAWOWE CECHY

- produkt gotowy do użycia
- kompozycja na bazie etanolu i IV rzędowych związków amonowych
- szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
- aktywny wobec wirusów w 30 sekund: HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpes wirus, SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, H1N1
- aktywny również wobec Tbc i MRSA
- preparat może być bezpiecznie stosowany w obecności pacjentów
- zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholu
- kompatybilność materiałowa potwierdzona licznymi testami
- możliwość dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
- możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie jak i przy użyciu ściereczki
- preparat po aplikacji nie tworzy tłustego nalotu
- po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych śladów
- posiada przyjemny świeży zapach

SKŁAD

Etanol 55%, IV rzędowe związki amonowe (propionian)

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

- 30 sekund: bakteriobójczy, prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1)
- 5 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, Norowirus, A H1N1)

SPOSÓB UŻYCIA

- Preparat do użyciu profesjonalnego.
- Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.
- Stosować na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie.
- Nanosić na dezynfekowane powierzchnie i przedmioty bezpośrednio z butelki przy użyciu końcówki spryskującej lub spryskanej ściereczki [zalecane jednorazowe chusteczki włókninowe Medilab].



1. Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprzndzić za pomocą chusteczki.
2. Nie wycierać, pozostawić do wyschnięcia. Odczekać min. 30 sekund.
3. Powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć dokładnie wodą zdatną do picia.

OPAKOWANIA

- Aniospray Quick: butelka – 1 litr
- Aniospray Quick: butelka - 1 litr ze spryskiwaczem
- Aniospray Quick: kanister – 5 litrów
- Wyposażenie dodatkowe: końcówka spryskująca, jednorazowe chusteczki włókninowe

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

PRODUCENT: Laboratoires Anios, Francja

DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • tel.: 85 747 93 00 • fax: 85 747 93 12 • www.medilab.pl