

**KARTA GWARANCYJNA
UCHWYT ŁAZIENKOWY NA WANNĘ RF-900**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma Reha Fund zapewnia Nabywcę, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz dobrej jakości.
2. Sprzęt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji.
3. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte bezpłatnie przez producenta, pod warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
4. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do Punktu Serwisowego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją czyszczeniem i regulacją sprzętu opisane w instrukcji użytkowania
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, szyny sprężyny itp.
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia sprzętu np. urwania, stłuczenia, wygięcia, zarysowania itp.
 - wady powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, dokonywanie samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
6. Przed oddaniem sprzętu do Punktu Serwisowego należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
7. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, wyłącznie w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.
8. Sprzęt jest przeznaczony do użytku prywatnego. Nie należy go wykorzystywać w siłowniach i klubach kulturystycznych.
9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Nabywca będzie obciążony kosztami dojazdu.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

PRZEGLĄD/NAPRAWA (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i Podpis Serwisu
1.					
2.					
3.					

PRODUCENT:
REHA FUND Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 14
 03-310 Warszawa, POLAND
 tel.: +48 22 594 03 00
 fax.: +48 22 594 03 07
 e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14
 03-310 Warszawa
www.rehafund.pl

tel. (22) 59 40 300
 fax (22) 59 40 307
 e-mail: info@rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

UCHWYT ŁAZIENKOWY NA WANNĘ RF-900

Nr katalogowy: RF-900
Max. bezpieczne obciążenie: 180 kg
Całkowita długość: 485mm
Regulacja szerokości mocowania: 82mm-172mm
Waga: 2,82kg

UWAGA!

Przed rozpoczęciem korzystania z uchwytu należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Uchwyt łazienkowy na wannę, przeznaczony jest dla osób, które wymagają dodatkowego podparcia przy kąpielu



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed korzystaniem z uchwytu upewnić się, że jest on dobrze zamocowany na wannie.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować złe funkcjonowanie sprzętu.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia uchwytu.
4. Nie przechowywać uchwytu w temperaturze poniżej 0°C

Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

MONTAŻ

1. Odkręć śrubę blokującą ramię służącą do regulacji szerokości mocowania.
2. Załóż uchwyt na bok wanny tak aby śruba wystawała na zewnątrz wanny.
3. Mocno dokręć śrubę blokującą.

Upewnij się czy uchwyt jest zamontowany prawidłowo. Zanim uchwyt będzie można oddać do użycia należy wykonać kilka energicznych prób wytrzymałości jego mocowania do wanny

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zaleca się regularną kontrolę uchwytu pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
- Zaleca się regularne czyszczenie. Uchwyt należy czyścić miękką szmatką oraz wodą z mydłem, po wyczyszczeniu należy go osuszyć miękką szmatką.

UWAGA!

Do czyszczenia uchwytu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

**KARTA GWARANCYJNA
UCHWYT ŁAZIENKOWY NA WANNĘ RF-900**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma Reha Fund zapewnia Nabywcę, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz dobrej jakości.
2. Sprzęt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancji.
3. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte bezpłatnie przez producenta, pod warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
4. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do Punktu Serwisowego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją czyszczeniem i regulacją sprzętu opisane w instrukcji użytkowania
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, szyny sprężyny itp.
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia sprzętu np. urwania, stłuczenia, wygięcia, zarysowania itp.
 - wady powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, dokonywanie samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
6. Przed oddaniem sprzętu do Punktu Serwisowego należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
7. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, wyłącznie w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.
8. Sprzęt jest przeznaczony do użytku prywatnego. Nie należy go wykorzystywać w siłowniach i klubach kulturowych.
9. W przypadku niezasadzonego wezwania serwisu, Nabywca będzie obciążony kosztami dojazdu.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

PRZEGLĄD/NAPRAWA (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i Podpis Serwisu
1.					
2.					
3.					

PRODUCENT:
REHA FUND Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 14
 03-310 Warszawa, POLAND
 tel.: +48 22 594 03 00
 fax.: +48 22 594 03 07
 e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14
 03-310 Warszawa
www.rehafund.pl

tel. (22) 59 40 300
 fax (22) 59 40 307
 e-mail: info@rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

UCHWYT ŁAZIENKOWY NA WANNĘ RF-900

Nr katalogowy: RF-900
Max. bezpieczne obciążenie: 180 kg
Całkowita długość: 485mm
Regulacja szerokości mocowania: 82mm-172mm
Waga: 2,82kg

UWAGA!

Przed rozpoczęciem korzystania z uchwytu należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Uchwyt łazienkowy na wannę, przeznaczony jest dla osób, które wymagają dodatkowego podparcia przy kąpielu



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed korzystaniem z uchwytu upewnić się, że jest on dobrze zamocowany na wannie.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować złe funkcjonowanie sprzętu.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia uchwytu.
4. Nie przechować uchwytu w temperaturze poniżej 0°C

Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

MONTAŻ

1. Odkręć śrubę blokującą ramię służącą do regulacji szerokości mocowania.
2. Załóż uchwyt na bok wanny tak aby śruba wystawała na zewnątrz wanny.
3. Mocno dokręć śrubę blokującą.

Upewnij się czy uchwyt jest zamontowany prawidłowo. Zanim uchwyt będzie można oddać do użycia należy wykonać kilka energicznych prób wytrzymałości jego mocowania do wanny

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zaleca się regularną kontrolę uchwytu pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
- Zaleca się regularne czyszczenie. Uchwyt należy czyścić miękką szmatką oraz wodą z mydłem, po wyczyszczeniu należy go osuszyć miękką szmatką.

UWAGA!

Do czyszczenia uchwytu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.