

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## TRÓJNÓG RF-300

Nr katalogowy.:	RF-300
Max. bezpieczne obciążenie:	127 kg
Regulacja wysokości:	762 mm – 1016 mm
Waga:	1,15 kg

**UWAGA!**

Przed rozpoczęciem korzystania z trójnogu, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

**PRZEZNACZENIE**

Trójnóg przeznaczony jest do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia, do podparcia, utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w przypadkach schorzeń urazowo – ortopedycznych kończyn dolnych. Trójnóg posiada trzy punkty podparcia co zapewnia użytkownikowi większą stabilność podczas chodzenia.

**ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA**

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
2. Podczas korzystania z trójnogu zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
3. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie trójnogu w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.

**UWAGA!**

Poniższe zalecenie to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.

Wysokość trójnogu powinna być tak dopasowana do użytkownika, aby mógł on zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętą kończyną górną w stawie łokciowym. Wówczas ciężar ciała podczas chodzenia częściowo jest przenoszony na trójnóg.

**MATERIAŁ**

- rurka górna wykonana z aluminium
- podstawa wykonana ze wysokogatunkowej stali
- rękojeść i obejmę wykonaną z tworzywa sztucznego
- gumowe nasadki wzmocnione metalem adaptują się idealnie do wszystkich powierzchni

**KOLOR:**

- rurka górna - aluminiowa polerowana
- dolna podstawa - stal polerowana
- rękojeść i nasadki - szare

**PRODUCENT:**


REHA FUND Sp. z o.o.  
ul. Staniewicka 14  
03 – 310 Warszawa, POLAND  
tel.: +48 22 594 03 00  
fax.: +48 22 594 03 07  
e-mail: info@rehafund.pl  
www.rehafund.pl

## REGULACJA WYSOKOŚCI

Aby wyregulować trójnog na pożądaną wysokość należy:

- wcisnąć przycisk zwalniający (rys. 1) i lekko przekręcić podstawę
- ustawić pożądaną wysokość
- obrócić podstawę tak aby przycisk zablokował się w otworach

Należy dokładnie sprawdzić czy przycisk jest zablokowany w otworach.

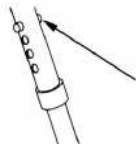

Rys. 1

## CZYSZCZENIE

- części z tworzywa należy czyścić tylko ciepłą wodą z dodatkiem mydła
- części metalowe należy czyścić suchą szmatką

## UWAGA!

**Do czyszczenia trójnogu nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.**

## KONSERWACJA

- Zaleca się regularną kontrolę trójnogu, aby upewnić się czy:
  - nie pojawiły się pęknięcia lub załamania
  - przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość
  - otwory w rurce nie są powiększone lub wydłużone
  - nie ma luzów na rękojeści
  - dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić

## UWAGA!

**W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przydatności trójnogu do użycia skontaktuj się z serwisem producenta.**

## KARTA GWARANCYJNA TRÓJNÓG RF-300

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

## WARUNKI GWARANCJI

1. Firma Reha Fund zapewnia Nabywcę, że przedmiot sprzedaży na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz dobrej jakości.
2. Sprzęt objęty jest 18-miesięcznym okresem gwarancji.
3. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte bezpłatnie przez producenta, pod warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkownika.
4. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do Punktu Serwisowego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
5. Gwarancją nie są objęte:
  - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją sprzętu opisane w instrukcji użytkownika
  - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, szyny sprężyny itp.
  - mechaniczne i termiczne uszkodzenia sprzętu np. urwania, stłuczenia, wygięcia, zarysowania itp.
  - wady powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, dokonywanie samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
6. Przed oddaniem sprzętu do Punktu Serwisowego należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkownika, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
7. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, wyłącznie w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.
8. Sprzęt jest przeznaczony do użytku prywatnego. Nie należy go wykorzystywać w siłowniach i klubach kulturystycznych.
9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Nabywca będzie obciążony kosztami dojazdu.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

## PRZEGLĄD/NAPRAWA (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i Podpis Serwisu
1.					
2.					
3.					