





Rozkładanie zestawu do porodu Matodrape

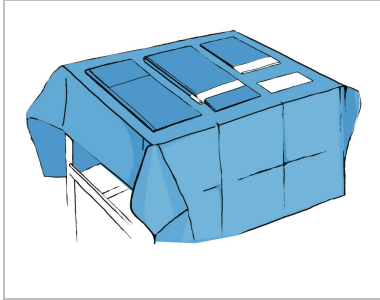

1. Po otwarciu opakowania połóż obłożenie na stole do instrumentarium. Zewnętrzną serwetą zabezpiecz stół oraz pozostałe elementy. Rozłóż elementy na stole.



2. Połóż większy podkład Seni Soft pod pośladki pacjentki.

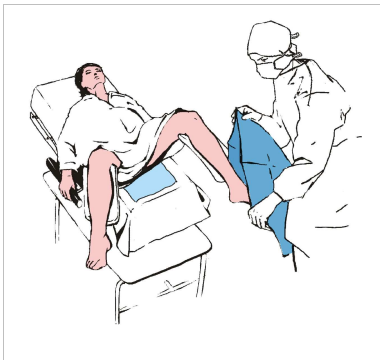

3. Użyj serwety z zestawu do owinięcia nogi pacjentki aby zapewnić sterylność pola operacyjnego.



4. Po porodzie wytrzymaj noworodka załączonymi serwetkami z miękkiej, białej włókniny.



5. Zawiń noworodka w mniejszy podkład Seni Soft i załóż dziecku czapeczkę na głowę.