






Rozkładanie zestawu uniwersalnego Matodrape

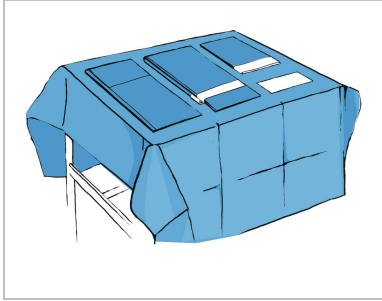


1. Po otwarciu opakowania połóż obłożenie na stole do instrumentarium. Zewnętrzną serwetą zabezpiecz stół oraz pozostałe elementy. Rozłóż elementy na stole i zwróć uwagę na piktogramy na serwetach oznaczające miejsce aplikacji.

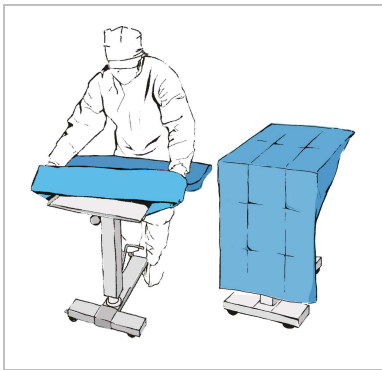


2. Nasuń pokrowiec w postaci worka na stolik Mayo.

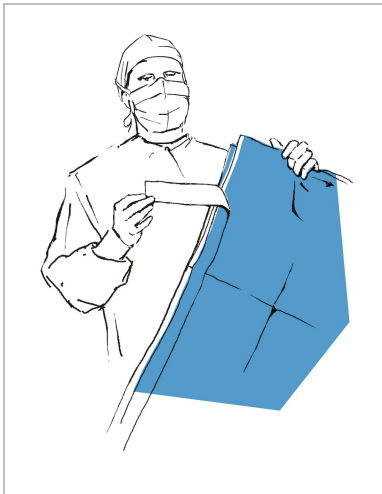


3. Odklej taśmę zabezpieczającą z serwetki oznaczonej piktogramem stopy.

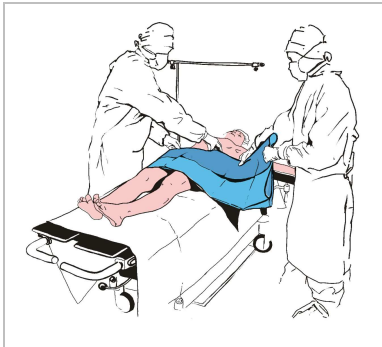

4. Zamocuj serwetkę do ciała pacjenta i rozwiń zgodnie z kierunkiem strzałek wyznaczając dolną granicę pola operacyjnego. Pozostałą część serwetki rozwiń na nogi.

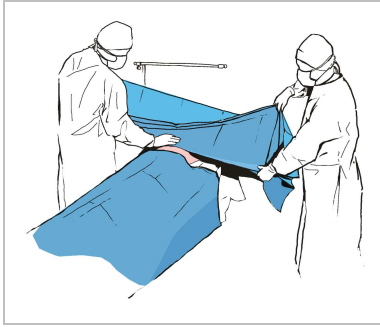

5. Zabezpiecz górną granicę pola operacyjnego przyklejając serwetę od strony głowy pacjenta (serweta oznaczona piktogramem głowy). Następnie rozwiń serwetę zgodnie z kierunkiem strzałek i umocuj ją do ekranu anestetycznego za pomocą przylepców na rogach serwety.

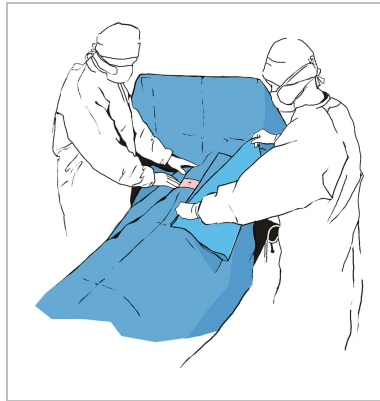

6. Umocuj serwety boczne wyznaczając ostatnie granice pola operacyjnego.